



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drschumacher.hu
E-mail cím: info@drschumacher.hu

Cleanisept Kendő

Gyors fertőtlenítésre szolgáló, alkoholmentes kendő

Készítménytípus

Alkoholmentes, használatra kész, fertőtlenítő kendők az orvosi eszközök és minden fajta felület **fertőtlenítésére** és **tisztítására** az élelmiszer-feldolgozás és a nagy konyhák valamennyi területén, valamint a gyógyászati területen. Különösen alkalmas az **alkoholra érzékeny gyógyászati termékek**, például a vaginális és abdominális vizsgálatokra szolgáló szondák ultrahangos fejei számára. Modern, kvaterner ammóniumvegyületeken alapul. A **Cleanisept Kendő alkoholmentes** és nem tartalmaz aldehideket és fenolokat. A jó tisztítóerő mellett kiténik **csekély toxicitásával**.
A **Cleanisept Kendő engedélyezett a Philips, a Shimadzu, a SonoAce, az Aloka, a GE és a Siemens** ultrahangos készülékek számára történő alkalmazásra.
A **Cleanisept Kendő** teljesíti a TRGS 525/540 szerinti, munkabiztonságra vonatkozó, törvényi követelményeket.

Alkalmazási terület

MPG szerint: Olyan alkoholra érzékeny gyógyászati termékek tisztítása és fertőtlenítése, mint a vaginális és abdominális vizsgálatokra szolgáló szondák ultrahangos fejei.
Biocid irányelv szerint: Minden fajta, alkoholra érzékeny gyógyászati eszköz és felület tisztítása és fertőtlenítése. Az élelmiszerfeldolgozás és a nagy konyhák valamennyi területén is.

Alkalmazás

A felületeket és a tárgyakat annyira kell áttörölni, hogy teljesen nedvesek legyenek. A felületet a behatási idő letelte után szükség esetén át kell törölni egyszer használatos kendővel. Ultrahangos szondákon történő használat esetén ajánlott a napi egyszeri áttörés egy mikrobiológiailag kifogástalan vízzel átitatott, egyszer használatos kendővel. Mindig ügyelni kell arra, hogy az ultrahangos fejet **minden** egyes használat előtt fertőtleníteni kell a **Cleanisept Kendő**-vel. A **Cleanisept Kendő** használatra kész, egyenként letéphető és gyorsan felhasználható. A használatához az egyes kendőket ferdén ki kell húzni a nyíláson keresztül és le kell tépni.

Mikrobiológia és behatási idő

Az adatok a kendők átitatására használt **Cleanisept** folyadékra vonatkoznak:
baktericid (beleértve MRSA-t)
fungicid
vírusinaktiváló
HBV, HIV, HCV, rota-, papova-/polyoma- és vakcíniovírusokra inaktiváló
Behatási idő a baktériumokra és gombákra, valamint a burkos vírusokra (HBV, HIV, HCV és rota vírusokra) vonatkozó DGHM/VAH szakvélemény szerint: 1 perc.
Behatási idő papovavírusok esetén: 5 perc.

Összetétel

A kendők átitatására használt (7,5%-os) **CLEANISEPT** 100 g-ja hatékony összetevőként tartalmaz:
0,25 g didecil-dimetil-ammóniumkloridot
0,25 g alkilbenzil-dimetil-ammóniumkloridot
0,25 g alkiletil-benzil-dimetil-ammóniumkloridot
Tartalom: 1 doboz/utántöltő tartalmaz 100 kendőt á 14 x 20 cm átitatva 210 g Cleanisept (7,5%-os) oldattal

Különleges figyelmeztetés

Ha szemmel érintkezik, akkor azonnal alaposan ki kell öblíteni sok vízzel, a szemhéj alatt is. A fertőtlenítőszer biztonságos módon kell alkalmazni. Használat előtt mindig el kell olvasni a jelölést és a termékinformációt.

Kiszerezés

Egység	Csomagolási egység	Cikksz.
PE adagoló doboz 100 kendővel	1 x 1 doboz	00. 208. 001
Utántöltő tasak 100 kendővel	12 x 1 tasak	00. 208. 002

Szakvélemények

Univ.-Prof. Dr. med. Marth, higiénikus, Graz:
A **CLEANISEPT** felületfertőtlenítésre történő használatának hatékonyságára vonatkozó, VAH/DGHM irányelv szerinti, 2002.04.22-i szakvélemény.
Prof. Dr. Reuter, higiénikus, Berlin:
A **Cleanisept** fertőtlenítőszer élelmiszeripari területen történő alkalmazása hatékonyságára vonatkozó, 1993.03.08-i szakvélemény.
Dr. Steinmann, virológus, Bréma:
CLEANISEPT-re vonatkozó szakvélemény a rotavírusok elleni hatékonyságról, 2003.08.20.; a vakcíniovírus elleni hatékonyságról, 2005.08.25.; a BVDV vírusok (HCV vírusok) elleni hatékonyságról, 2005.09.10.; a papova-/poliovírusok elleni hatékonyságról, 2006.01.23.
Siemens Medical Solutions cég:
Engedély a **CLEANISEPT KENDŐ** Siemens ultrahangos készülékeken történő alkalmazásához, 2005.10.04.
Philips Medizin Systeme GmbH cég:
Engedély a **CLEANISEPT KENDŐ** Philips ultrahangos készülékeken történő alkalmazásához, 2005. március.
Schmitz&Söhne, Wickede cég:
Engedély a **CLEANISEPT KENDŐ** Schmitz&Söhne cég gyógyászati eszközein valamint párnáin történő alkalmazásához, 2006. március.
Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg cég:
Engedély a **CLEANISEPT KENDŐ** Shimadzu ultrahangos készülékeken történő alkalmazásához, 2006.03.30.
Bioscientia, Dr. M. Geissler, Mainz:
A **CLEANISEPT KENDŐ** bioscientia általi, mikrobiológiai vizsgálata gyakorlati teszt alapján a miltenberg-erlenbachi klinikákon, 2006.05.05.
SonoAce GmbH, Marl:
Engedély a **CLEANISEPT KENDŐ** a SonoAce GmbH készülékein és szondáin történő alkalmazásához, 2006.11.09.
CLEANISEPT KENDŐ: 2004.11.02-i, dermatológiai szakvélemény.

Listázás

A **CLEANISEPT** átitatására szolgáló folyadékot felvették a VAH/DGHM aktuális fertőtlenítőszer listájára.
A **CLEANISEPT** átitatására szolgáló folyadékot felvették a DVG (Német Állatorvosi Társaság) élelmiszerterületének aktuális fertőtlenítőszer listájára.
A **CLEANISEPT** átitatására szolgáló folyadékot a baua (Munkavédelmi és Munkaorvosi Szövetségi Intézet) biocid terméként regisztrálta a biocid törvény szerint: baua reg.sz.: N - 20325.

Gyártja: Dr.Schumacher GmbH, Melsungen, Németország
Forgalmazza: Dr. Schumacher Magyarország Kft