



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drschumacher.hu
E-mail cím: info@drschumacher.hu

Desco Bohrerbad

Fogászati fúrók, csiszoló korongok tisztítása, fertőtlenítése. Aldehyd-, fenol-, és klórmentes

A készítmény típusa

Aktív tisztító-fertőtlenítőszer, használatra kész állapotban, fogászati fúrók és más precíziós eszközök számára. Káliumhydroxid alapú speciális oldószer és korrózió gátló.

Biológiailag lebomlik! A Desco Bohrerbad megfelel a humángyógyászati berendezéseket érzékennyé tevő veszélyes követelményeknek (525/540).

Alkalmazási területek

Rövid idő alatt fertőtleníti az egyidejű tisztítás mellett, amely a fogászati gyakorlatban elengedhetetlen.

Felhasználás

Az eszközöket azonnal a használat után előzetes tisztítás nélkül a munkaadatba helyezzük. (Fedéllel ellátott edényzetet használjunk!). A fertőtlenítő eljárás 5 perc múlva befejeződik, majd vegyük ki az eszközöket, gondosan, folyóvízben öblítsük le, majd szárítsuk meg!

Mikrobiológia

A Desco Bohrerbad hatásspektruma:

- Baktericid (beleértve a TbB)
- fungicid
- virucid (HBV/HIV)

Összetétel

100 g szer a következőket tartalmazza:
Káliumhydroxid 2.0 g

Kémiai-fizikai adatok

A koncentráció átlátszó, színtelen folyadék

pH-érték: 13.5+/-0.5
Sűrűség (20°C): 1.006 +/-0.005
Viszkózitása: cc. 8 mPaS

Adagolási segédeszközök

Adagolópumpa kannához, kannacsap

Felhasználási koncentráció

Felhasználásra kész oldat! Ne hígítsuk!
Behatási idő: 5 perc

Speciális útmutató

Az anyag ne kerüljön bőrre, szembe, szájba!

Gumikesztyű használata kötelező!

Ha készítmény szembe kerül, a szemet azonnal bő vízzel ki kell öblíteni, ha a bőrre kerül bő vízzel azonnal le kell mosni!

Lenyelés esetén a sérültet friss levegőre kell juttatni, majd azonnal szakorvosi ellátásban kell részesíteni!

Figyelmeztetés: Gyermekek elől jól elzárandó!

Az oldatot hígítani TILOS!

Az oldatba semmiféle alumínium eszköz nem tehető!

Szállítási formák

Egyedi csomagolás: Értékesítési egység: Cikkszám:

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 2 literes PE flakon | 6x 2liter | 00.803.020 |
| 5 literes PE kanná | 1x 5 liter | 00.803.050 |

Raktározás és eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, gyártástól számítva 2 évig eltartható. Közvetlen napsütéstől védeni kell.

Felvétel a listára

Felvétel a DGHM által hatékonyan nyilvánított fertőtlenítőszer listájára (1997. évi állapot).

A DGHM bizonylata 1997.06.30.

Bejelentés a Berlini Környezetvédelmi Hivatalnál.

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország

Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

engedély száma: OTH 2099-2/2000

Készítményeink környezet-kímélők, hígítva lebonthatók. Készítményeinket a GMP-irányvonalaknak megfelelően gyártjuk. Laboratóriumunk állandóan ellenőrzi készítményeinket. A készítményekhez kapcsolódó ajánlások intenzív tudományos vizsgálatokon alapulnak, az ajánlásokat legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. Felelősségünk kizárólag az általános értékesítési és szállítási feltételekben foglaltakra vonatkoznak.