



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drschumacher.hu
E-mail cím: info@drschumacher.hu

Descoprent

Fogászati lenyomat fertőtlenítő, formaldehidmentes, fenolmentes

A készítmény típusa

Felhasználásra kész oldat, fogászati lenyomatok gyors és hatásos merülő fertőtlenítéséhez és tisztításához, aldehiddel és QAV bázissal. A Descoprent anélkül fertőtleníti, hogy a lenyomatok méretét és felületének minőségét nem befolyásolja. Szín és illat semleges, formaldehid-, és fenolmentes.

Alkalmazási területek

A Descoprent a fogtechnikai munkadarabok és protézis darabok, (mint formázatok Polyetherből, A/C-Szilikonból, Alginátból és Hidrokolloidból) gyors fertőtlenítését és alapos tisztítását biztosítja.

Felhasználás

Alginátot és hidrokolloidot rövid ideig mártsuk bele az oldatba.
Behatási idő: 10 perc.

Mikrobiológia

A Descoprent hatásspektruma:
-Baktericid (beleértve a TbB)
-fungicid
-vírucid (HBV/HIV, Rota)

Összetétel

100 g szer a következőket tartalmazza:

Pentandia	0.01 g
Ethandial	0.20 g
Dimethylbenzylalkylammóniumchlorid	0.48 g

Kémiai-fizikai adatok

A koncentrátum kinézete:	átlátszó világoskék folyadék
pH-érték:	5.5 +/-1.0
Sűrűsége 20°C	1.000 +/-0.003

Adagolási segédeszközök

Adagolópumpa kannához, kannacsap

Felhasználási koncentráció

Munkakész oldat

Speciális útmutató

Az anyag ne kerüljön bőrre, szembe, szájba!
Ha a készítmény szembe kerül, a szemet azonnal bő vízzel ki kell öblíteni, ha bőrre kerül, azonnal bő vízzel le kell mosni!
Lenyelés esetén a sérültet friss levegőre kell juttatni, majd azonnal szakorvosi ellátásban kell részesíteni!
Figyelmeztetés: Gyermekek elől jól elzárandó!
Élelmiszerektől elkülönítve tárolandó!
Más fertőtlenítőszerrel keverni TILOS!

Szállítási formák

Egyedi csomagolás:	Értékesítési egység:	Cikkszám:
5 literes PE kanna	1x 5 liter	00.813.050

Raktározás és eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, gyártástól számítva 3 évig eltartható.
Közvetlen napsütéstől védeni kell!

Felvétel a listára

Felvétel a DGHM által hatékonyak nyilvánított fertőtlenítőszer listájára (1997. évi állapot).
A DGHM bizonylata 1997.03.31.
Bejelentés a Berlini Környezetvédelmi Hivatalnál.

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország
Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ engedély száma: OTH 3767-2/2005