



**Dr. Schumacher** Magyarország Kft.  
1116 Budapest Kondorosi út 3.  
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38  
Honlap cím: [www.drscumacher.hu](http://www.drscumacher.hu)  
E-mail cím: [info@drscumacher.hu](mailto:info@drscumacher.hu)

## Descosal

Egyfázisú tisztító és felületfertőtlenítő szer, formaldehidmentes, fenolmentes

### A készítmény típusa

Aldehideken és négyalkotós ammónium-vegyületeken alapuló kombinált preparátum felületek és berendezések fertőtlenítésére és tisztítására, természetes kókuszszírból kiindulva. Korrózióvédelemmel. Formaldehidmentes. Gyakorlatilag nincs szagképződés, igen felhasználóbarát.

### Alkalmazási területek

Sokoldalúan alkalmazható preparátum mindenfajta-mosható felületre, mosható padló-, és falburkolatok, berendezési-, felszerelési tárgyak felületeinek tisztító hatású felületfertőtlenítésére. Alkalmos ágytál mosó készülékekhez, központi és helyi adagoló berendezésekhez.

### Felhasználás

1. Tisztítás és fertőtlenítés, törléses, vagy permetezéses módszerrel
2. Központi vagy helyi adagoló berendezésekből
3. Takarítógépekkel
4. Porlasztás helyhez kötött vagy mobil készülékekből
5. Adagoló flakonból

### Mikrobiológia

A DECOSAL hatásai:  
baktericid (beleértve a TbB baktériumokat, MRSA fungicid,  
vírucid (HBV/HIV/Rotavírus inaktíváló is)

### Összetétel

100g szer a következőket tartalmazza:

9,5g glioxal  
22,0g dimetilbenzil-kókuszszíralkil-ammóniumklorid  
nonionikus tenzid, korróziógátló  
100g ad víz

### Kémiai/fizikai adatok

A koncentrátum tiszta, enyhén sárgás ill. kék folyadék  
pH-érték: kb. 4,5  
A 0,5%-os oldat pH-értéke: kb. 5,6  
Sűrűség ( 20,0 °C) 1,05  
Refrakció: 1,400 +/- 0,003

### Felhasználási koncentrációk

Behatási idő a DGHM szerint:	1,0 %	30 perc
	0,5 %	1 óra
Hepatitis –B	0,5%	30 perc
Rota –vírus inaktíválás	0,5%	1 óra

A munkaoldatot mindig a felhasználás előtt frissen kell készíteni! Az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni, szükség esetén a behatási idő letelte után a felület csapvízzel öblíthető.

### Szállítási formák

Egységnyi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
2 literes PE flakon	6 x 2 liter	00.203.020
5 literes PE kanna	1 x 5 liter	00.203.050
10 literes PE kanna	1 x 10 liter	00.203.100

### Adagolási segédeszközök

Adagolószivattyú kannához, adagolóflakon, kannacsap.

### Speciális útmutatás

Nem szabad lenyelni! El kell kerülni, hogy a koncentrátum a bőrrel vagy a szemmel érintkezzen. Az érintkezésbe került testrészeket sok vízzel alaposan le kell öblíteni. A szakmai szervezetek előírják a kesztyűben történő munkavégzést. Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Más tisztító- vagy öblítőszerrel nem keverhető!  
Tűzvesélyességi osztály: nem tűzvesélyes.

Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások: A koncentrátum maró hatású, R34. A készítmény bőr-, szem- és nyálkahártya irritáló hatású. A koncentrátummal történő munkavégzéskor védőruházat, védőkesztyű használata kötelező.

Elsősegélynyújtás: Ha a készítmény szembe kerül, azt 10-15 percig vízzel alaposan ki kell öblíteni, majd a sérültet szakorvosi ellátásban kell részesíteni (S26). Véletlen lenyelés esetén a sérültet nyugalomba kell helyezni.

### Raktározás és eltarthatóság

Tárolás és eltarthatóság: eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen 3 évig eltartható.

Gyártja: Dr.Schumacher GmbH, Melsungen, Németország  
Forgalmazza: Dr. Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ engedély száma: OTH 3756-2/2005