



**Dr. Schumacher** Magyarország Kft.  
1116 Budapest Kondorosi út 3.  
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38  
Honlap cím: [www.drscumacher.hu](http://www.drscumacher.hu)  
E-mail cím: [info@drscumacher.hu](mailto:info@drscumacher.hu)

## Descosept Spray

Permetező gyors felület fertőtlenítőszer, formaldehidmentes, fenolmentes

### A készítmény típusa

Etanol, glioxal és QAV alapú, felhasználásra kész szóró-törítő fertőtlenítőszer 2 m<sup>2</sup>-nél kisebb felületek hatékony és gyors fertőtlenítésére. A Descosept kellemes, friss illattal rendelkezik és a bőr jól viseli.

### Alkalmazási területek

Felületi fertőtlenítőszerként minden területen, ahol a gyors fertőtlenítésre van szükség.

Alkalmos:

- orvosi és fogorvosi rendelőkben, ahol gyors fertőtlenítésre van szükség (pl.: vizsgálószék)
- műtőberendezések és a műtőasztal, valamint aneszteziológiai berendezések fertőtlenítésére a műtétek között
- ágyak, matracok, takarók és párnák
- szállítóeszközök, mint a betegszállító járművek, orvosi ügyeleti kocsik, hulladékszállító kocsik és szállítókosarak
- általános bútorzat, mint a vizsgálóasztalok, kötözőkocsik, fürdőkádak és WC ülőkék
- ruházat, mint a munkaköpenyek, műtőcipők, gumikötények és fehéreműk
- minden védőberendezés

### Felhasználás

A felületeket és a tárgyakat legalább 30 cm távolságból a teljes benedvesítésig be kell permetezni. A Descosept gyakorlatilag nem képez bevonatot.

### Mikrobiológia

A Descosept hatásai:

- Baktericid (beleértve a TbB) MRSA
- fungicid
- virucid (HBV/HIV/Rota)

### Összetétel

100 g szer a következőket tartalmazza:

- 38.9 g etanol
- 0.1 g glioxal
- 0.05 g didecylidimethyl-ammoniumklorid

### Kémiai-fizikai adatok

- A koncentráció kinézete: víztiszta folyadék
- pH-érték: kb 5.0
- Lobbanás pont: DIN 51 755: 25°C felett

### Adagolási segédeszközök

Szórófej az 1 literes flakonhoz

### Felhasználási koncentráció

Behatási idő a DGHM:	konc.:	5 perc
Tuberkolózis:	konc.:	5 perc
HBV/HIV:	konc.:	1 perc

### Speciális útmutató

Készítménnyel történő munkavégzés során védőkesztyűt és védőszemüveget kell alkalmazni! Kerüljük a készítmény belégzését.

Ha a készítmény bőrre kerül, azonnal szappannal, bő vízzel le kell mosni. Ha a készítmény szembe kerül, azt legalább 10 percig vízzel alaposan ki kell öblíteni és a sérültet szakorvosi ellátásban kell részesíteni. Inhaláció esetén a sérültet friss levegőn nyugalomba kell helyezni, szükség esetén orvosi ellátást kell biztosítani.

**Figyelmeztetés: Gyermekek elől jól elzárandó!  
Élelmiszerektől elkülönítve tárolandó!  
Nyílt láng közelében és feszültség alá helyezett készüléken alkalmazni TILOS!**

### Szállítási formák

Egyedi csomagolás:	Értékesítési egység:	Cikkszám
250 ml PE flakon szóró	25 x 250 ml	00.301.002
1 literes PE flakon	12 x 1 liter	00.301.010
5 literes PE kanna	1 x 5 liter	00.301.050

### Raktározás és eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen, hőforrástól, nyílt lángtól elkülönítve, gyártástól számítva 2 évig eltartható.

### Felvétel a listára

Felvétel a DGHM által hatékonyan nyilvánított fertőtlenítőszer listájára (1997. évi állapot).

A DGHM bizonylata 1997.03.31.

Bejelentés a Berlini Környezetvédelmi Hivatalnál.

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország  
Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ engedély száma: OTH 3757-2/2005

Készítményeink környezet-kímélők, hígítva lebomlanak. Készítményeinket a GMP-irányvonalaknak megfelelően gyártjuk. Laboratóriumunk állandóan ellenőrzi készítményeinket. A készítményekhez kapcsolódó ajánlások intenzív tudományos vizsgálatokon alapulnak, az ajánlásokat legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. Felelőségünk kizárólag az általános értékesítési és szállítási feltételekben foglaltakra vonatkoznak.