



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drscumacher.hu
E-mail cím: info@drscumacher.hu

Descosept AF Tücher

Alkoholos gyorsfertőtlenítő törölkendő, aldehidmentes, fenolmentes

A készítmény típusa

A felhasználásra kész kendők etanolbázisú, glioxál és a QAV hatékony és gyors fertőtlenítésére, valamint kis felületek és orvosi műszerek tisztítására alkalmasak. A **DESCOSEPT AF TÜCHER kellemes illatú és bőrkímélő.**

A **DESCOSEPT AF TÜCHER** megfelel a munkavédelmi törvényi követelményeknek, a humán orvosi berendezések veszélyeztető anyagainak szemponjából (ld. TRGS 525/540).

Alkalmazási területek

Törléses fertőtlenítés minden területen, ahol gyors fertőtlenítés szükséges. Alkalmas:

- Orvosi és fogorvosi praxisokban, ahol követelmény a gyors fertőtlenítés (pl. **kezelőszékek, egyenes-, és könyökdarabok**)
- Műtős berendezések és műtőasztal gyors fertőtlenítése két műtét között
- Ágyszerkezet, szállítóeszközök, pl. betegszállító járművek, mentőkocsik, szemétszállító járművek és szállítókosarak
- Általánosan mozgó eszközök, mint vizsgálóasztalok, kötözőkocsik, fürdőkádak és WC-ülőkék
- Ruházat, pl. műtőscipők, gumikötények

Alkalmazás módjai

A felületeket és tárgyakat a DESCOSEPT AF TÜCHER kendővel teljesen letörölni, ill. elegendően benedvesíteni.

Mikrobiológia

Baktericid (beleértve TbB,) MRSA
Fungicid/Leuvirocid (C. albicans)
Vírusinaktiváló -HBV/HIV/HCV/BVDV/Rota-
Adeno-/Vaccinia-/Noro vírusok

Behatási idő:	
DGHM szerint	konc. - 2 perc
Tbc (M. terrae)	konc. - 1 perc
Aspergillus niger	konc. - 30 perc
HBV/HIV/HCV/BVDV	konc. - 0,5 perc (RKI ajánlások teljesülése esetén)
Rota/Adeno/Vaccinia	konc. - 1 perc
Noro vírusok	konc. -30 perc

Összetétel

100 g termék a következőket tartalmazza:

42,0 g	etanol
0,05 g	didecildimetil-ammóniumklorid

Kémiai-fizikai adatok

A koncentrátum kinézete: vízsztta folyadék

PH-értéke:	7,0 ± 1,0
Sűrűség (20,0 °C):	0,935 ± 0,005
Gyulladási pont DIN 57755):	25,0 °C felett

Speciális útmutató

Csak külsőleg. Az oldat szembe ne kerüljön. Gyúlékony. Forró tárgyakon ne használjuk! Alkoholérzékeny felületeket és akrilgáz-műanyagot ne nedvesítsünk be.

Szállítási formák

Egyedi csomagolás: Értékesítési egység: Cikkszám

PE-doboz 120 kendővel	12 x 1 doboz	00.313.001
Utántöltőtásak 120 kendővel	12 x 1 doboz	00.314.001

Felvétel a listára

A DGHM aktuális fertőtlenítőszer listájára felvették

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország
Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ engedély száma: OTH 3760-2/2005

Készítményeink környezet-kímélők, hígítva lebomlanak. Készítményeinket a GMP-irányvonalaknak megfelelően gyártjuk. Laboratóriumunk állandóan ellenőrzi készítményeinket. A készítményekhez kapcsolódó ajánlások intenzív tudományos vizsgálatokon alapulnak, az ajánlásokat legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. Felelősségünk kizárólag az általános értékesítési és szállítási feltételekben foglaltakra vonatkoznak.