



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drscumacher.hu
E-mail cím: info@drscumacher.hu

DESCOSEPT Tücher

Alkoholos gyorsfertőtlenítő törülköendő, formaldehidmentes, fenolmentes

A készítmény típusa

A felhasználásra kész kendők etanolbázisú, glioxál és QAV tartalmú, hatékony és gyors fertőtlenítésére, valamint kis felületek és orvosi eszközök tisztítására alkalmasak. A **DESCOSEPT TÜCHER kellemes illatú, bőrkímélő.** A **DESCOSEPT TÜCHER** megfelel a munkavédelmi törvényi követelményeknek, a humán orvosi berendezések veszélyeztető anyagainak szempontjából (ld. TRGS 525/540).

Alkalmazási területek

Törléses fertőtlenítés minden területen, ahol gyors fertőtlenítés szükséges. Alkalmas:

- Orvosi és fogorvosi praxisokban, ahol követelmény a gyors fertőtlenítés (pl. **kezelőszékek, egyenes-, és könyök darabok**)
- Műtős berendezések és műtőasztal gyors fertőtlenítése két műtét között
- Ágyszerkezet, szállítóeszközök, pl. betegszállító járművek, mentőkocsik, szemétszállító járművek és szállítókosarak
- Általános mozgó eszközök, mint vizsgálóasztalok, kötözőkocsik, fürdőkádak és WC-ülőkék
- Ruházat, pl. műtőscipők, gumikötények

Alkalmazás módjai

A felületeket és a tárgyakat a **DESCOSEPT TÜCHER**-rel teljesen letörölni, ill. elegendően benedvesíteni.

Összetétel

100 g termék tartalmaz:

38,9 g etanol
0,1 g glioxál
0,05 g didecildimetil-ammóniumklorid

Kémiai/fizikai adatok

A koncentráció kinézete: víztiszta folyadék
pH-értéke: 5,75 +/- 0,75
Sűrűség (20,0 °C): 0,938 +/- 0,002
Gyulladási pont DIN 57755): 27,0 °C felett

Mikrobiológia

A **DESCOSEPT TÜCHER:**

Baktericid (**beleértve TbB**) **MRSA**

Gungicid

Vírusinaktiváló (**HBV / HIV**)

Behatási idő:

DGHM szerint konc. – 1 perc*

Tbc konc. – 5 perc

HBV / HIV – inaktiválás konc. – 1 perc

Speciális útmutatás

Csak külsőleg. Az oldat szembe ne kerüljön. Gyúlékony. Forró tárgyakon ne használjuk! Alkoholérzékeny felületeket és akrilgáz-műanyagot ne nedvesítsünk be!

Szállítási formák

Egységnyi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
PE-doboz 120 kendővel	1 x 1 doboz	00.303.001
Utántöltő tasak 120 kendővel	12 x 1 tasak	00.304.001

Adagolási segédeszközök

Kannaáttöltő csap, adagolópumpa.

Szakvélemények

Professor Dr. Henkel, higiénikus, Lübeck:

Szakhigiéniai szakvélemény a **DESCOSEPT** készítmények hatékonyságáról, 1996. 05. 10.

Dr. Leimbeck, higiénikus, Bad Bocklet: Szakvélemény a **DESCOSEPT** tuberkulocid hatékonyságáról, 1988. 09. 07.

Professor Dr. Frösner, virológus, München: Szakvélemény a **DESCOSEPT** Hepatitis-B hatékonyságáról, 1990. 08. 08.

Professor Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt: Szakvélemény a **DESCOSEPT** szórófertőtlenítőről, 1997. 09. 12.

Professor Dr. Tronnier, dermatológus, Witten: Dermatológiai szakvélemény a bőrkímélőségről, 1996. 01. 16.

Felvétel a listára

A **DESCOSEPT** folyadékot a DGHM aktuális fertőtlenítőszer listájára felvették.

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország
Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft
ÁNTSZ Engedély száma: OTH 1185/2005