



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drscumacher.hu
E-mail cím: info@drscumacher.hu

Descosuc

Nagyhatékonyságú nyálszívó fertőtlenítő aldehidmentes, fenolmentes, klórmentes

A készítmény típusa

Fogászati és egyéb szívókészülékek fertőtlenítésére és tisztítására. Különösen alkalmas amalgám szeparátoros elszívó készülékek ápolására és fertőtlenítésére. A Descosuc hatása egy teljesen új hatóanyag kombinációján alapul, mely polymer Biguanidokból, oldást elősegítő és gyengén habzó tensidekből áll. A Descosuc megfelel a humángyógyászati berendezéseket érzékennyé tevő veszélyes anyagok elkerülésére vonatkozó munkabiztonsági törvényes követelményeknek (TRGS 525/540).

Alkalmazási területek

Rövid idő alatt fertőtleníti az egyidejű tisztítás mellett, a fogorvosi gyakorlatban nyálszívó rendszer fertőtlenítésére alkalmazható.

Felhasználás

A készülékeket a felhasználás után azonnal nyitott állapotban kell behelyezni az oldatba. Az oldatnak minden fertőtleníthető felületet és üreget be kell nedvesítenie. A szennyezettségi foktól függően ki kell cserélni az oldatot. A fertőtlenítési idő eltelte után a műszereket alaposan le kell öblíteni és meg kell szárítani. Alkalmas minden cirkulációs eljárásához és ultrahangos készülékhez.

Megjegyzés: Az erősen elszennyeződött műszerek esetében kizárólag kizárólag nemionos tenzid alapú kiegészítő tisztítófolyadék használható!

Az elkészített, de nem használt munkaoldat fedett állapotban két hétig tárolható.

Mikrobiológia

A Descosuc hatásai:

- Baktericid (beleértve a TbB is)
- fungicid
- virucid (HBV/HIV)
- szagtalanító hatású

Összetétel

100 g szer a következőket tartalmazza:
15 g Polyhexanid 20%-ig

Kémiai-fizikai adatok

A koncentráció : átlátszó világoskék folyadék
pH-érték: 5.0+/-1.0
Sűrűsége: 1.019+/-0.002
Fajsúly (20°C): 0.995-1.005

Adagolási segédeszközök

Adagolópumpa kannához, 1 literes adagoló flakon, kannacsap

Felhasználási koncentráció

	%	perc
Behatási idő:	2.5	5

A kész oldatnyhén habzik!

Speciális útmutató

A Descosuc minden az elszívókészülékek ápolásához szükséges alkotóelemet tartalmaz, ezért más készítményekkel keverni TILOS!

Az anyag ne kerüljön szembe, bőrre, szájba!

Gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező!

Ha a készítmény szembe kerül, a szemet azonnal bő vízzel ki kell öblíteni, ha a bőrre kerül, azonnal bő vízzel le kell mosni!

Lenyelés esetén a sérültet **friss levegőre kell juttatni, majd azonnal szakorvosi ellátásban kell részesíteni!**

Gyermekek elől elzárva tárolandó!

Szállítási formák

Egyedi csomagolás: Értékesítési egység: Cikkszám:

5 literes PE kanna 1x 5 liter 00.808.050

Raktározás és eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, gyártástól számítva 2 évig eltartható.

Felvétel a listára

Felvétel a DGHM által hatékonyan nyilvánított fertőtlenítőszeres listájára

A DGHM bizonylata 1993.05.19.

Bejelentés a Berlińi Környezetvédelmi Hivatalnál.

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország
Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi hivatal
engedély száma: OTH 1096-2/2003