



**Dr. Schumacher** Magyarország Kft.  
1116 Budapest Kondorosi út 3.  
Tel.: 06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38  
Honlap cím: [www.drscumacher.hu](http://www.drscumacher.hu)  
E-mail cím: [info@drscumacher.hu](mailto:info@drscumacher.hu)

## Perfektan Endo

Eszközfertőtlenítő szer, aldehidmentes, fenolmentes

### A készítmény típusa

A Perfektan Endo anyagkímélő, teljesen új, aktívan tisztító műszerfertőtlenítő szer, amelyik új alapokra helyezi a műszerfertőtlenítést.

A Perfektan Endo eleget tesz minden olyan követelménynek, amelyet hosszú ideje elvárnak a felhasználók.

A Perfektan Endo korroziógátló anyagokat tartalmaz, aldehid-, és fenolmentes. Egy munkafolyamatban teszi lehetővé a fertőtlenítést és a tisztítást. A fertőtlenítőhatás mellett tisztítóhatással is rendelkező úgynevezett egyfázisú készítmény.

### Alkalmazási területek

Rövid idő alatt fertőtleníti megfelelő tisztítás mellett.

Orvosi kézeszközök, anasztéziológiai eszközök, üveg, porcelán, műanyagok, valamint flexibilis és merev endoszkópok fertőtlenítéséhez alkalmazható.

A Perfektan Endo kiválóan alkalmas minden sebészeti eszközfertőtlenítésére, beleértve a MIC-sebészet eszközeit, az anesztéziái anyagokat, valamint a hőre labilissá váló anyagokat is. Erősen szennyezett eszközök esetében is használható.

### Felhasználás

A készülékeket a felhasználás után azonnal nyitott állapotban kell behelyezni az oldatba. Az oldatnak minden fertőtleníendő felületet és üreget be kell nedvesítenie. A szennyezettségi foktól függően ki kell cserélni az oldatot. A fertőtlenítési idő eltelte után a műszereket alaposan le kell öblíteni és meg kell szárítani. Alkalmas minden keringési eljárásához és ultrahangos készülékekhez.

Megjegyzés: Az erősen elszennyeződött műszerek esetében kizárólag nemionogén tenzid alapú kiegészítő tisztítófolyadék (pl.: Instru Plus) használható!

Az elkészített, de nem használt munkaoldat fedett állapotban két hétig tárolható.

### Mikrobiológia

A Perfektan Endo hatásspektruma:

-Baktericid (beleértve a TbB és Mycobacterium Terrae baktériumokat is) MRSA

-fungicid

-virucid (HBV/HIV, Papova, Adeno)

-sporocid

### Összetétel

100 g szer a következőket tartalmazza:

3.75 g cocospropiléndiaminguanidiniumdiacetát

5.63 g dideciloxtimetilammoniumpropionát

### Kémiai-fizikai adatok

A koncentrátum: tiszta, kékes-zöldes folyadék

pH-érték: 9.5-10.5

Az 1%-os oldat pH-értéke: kb.: 10.0

Fajsúly (20°C): 0.995-1.005

### Adagolási segédeszközök

Adagolópumpa kannához, 1 literes adagoló flakon, kannacsap

### Felhasználási koncentráció

	%	perc
Behatási idő a DGHM:	1	60
Mycobaktérium terrae:	2	30
Rövid ideig tartó fertőtlenítés:	3	15
HBV/HIV:	1	10
Adeno vírus:	1	30
Papova vírus:	1	60
	2	30

Ultrahangos készülékek esetén:

1 5

A behatási idő letelte után az eszközöket alaposan le kell öblíteni!

### Speciális útmutató

A Perfektan Endo első felhasználása előtt a műszereket és a fertőtlenítő kádákat alaposan meg kell tisztítani tiszta vízzel és Desco Cleaner tisztítószerrel, maradéktalanul el kell távolítani más vegyszereket, különösen az aldehid tartalmú termékek maradványait!

A Perfektan Endo primer bőringerlő hatásokat válthat ki a bőrön. Nem kerülhet a bőrre, vagy a szembe a használati oldat, illetve a koncentrátum. Ha a Perfektan Endo a bőrre fröccsen, akkor azonnal bő vízzel alaposan le kell öblíteni. A balesetvédelmi előírások szerint a nem bőrre beállított fertőtlenítőszer felhasználásakor védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Véletlen lenyelés esetén 3-4 pohár vizet kell itatni, hánytatni nem szabad, orvosi ellátást kell biztosítani.

**Figyelmeztetés: Gyermekek elől jól elzárandó!**

**Élelmiszerektől elkülönítve tárolandó!**

**Más fertőtlenítőszerrel keverni TILOS!**

### Szállítási formák

Egyedi csomagolás:	Értékesítési egység:	Cikkszám
1 literes PE flakon	1 x 1 liter	00.121.010
2 literes PE flakon	6 x 2 liter	00.121.020
5 literes PE kanna	1 x 5 liter	00.121.050

### Eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, gyártástól számítva 2 évig eltartható.

### Felvétel a listára

Felvétel a DGHM által hatékonyan nyilvánított fertőtlenítőszer listájára (1997. évi állapot).

A DGHM bizonylata 1997.03.31.

Bejelentés a Berlini Környezetvédelmi Hivatalnál.

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország

Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ engedély száma: OTH 1076-3/2003

Készítményeink környezet-kímélők, hígítva lebomlanak. Készítményeinket a GMP-irányvonalaknak megfelelően gyártjuk. Laboratóriumunk állandóan ellenőrzi készítményeinket. A készítményekhez kapcsolódó ajánlások intenzív tudományos vizsgálatokon alapulnak, az ajánlásokat legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. Felelősségünk kizárólag az általános értékesítési és szállítási feltételekben foglaltakra vonatkoznak.