



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drschumacher.hu
E-mail cím: info@drschumacher.hu

SILIKON SPRAY Műszerápoló aeroszol

A készítmény típusa

Műszerek kezelésére

- orvosi szilikon olaj alapú
- műszerek kezelésére a sterilizálást megelőzően
- biztosítja a mozgó alkatrészek megfelelő olajozottságát
- A speciális olajspray orvosi műszerek kezelésére használható aeroszol spray.
- A Silikon spray orvosi műszerek és egyéb rozsdamentes eszközök, pl. turbinák, zsanérok, fogászati fúrók, sarokpántok kezelésére használható aeroszol spray.
- Termosztabilitásának köszönhetően alkalmazható az eszközök későbbi hő sterilizálásához.
- A speciális spray finom védőréteget képez a felületen.
- A védőréteg nem befolyásolja a későbbi sterilizálást.
- A Silikon spray megőrzi a műszerek minőségét a megfelelő olajozottság és a hatékony korrózióvédelem által.
- A tiszta szilikonolaj használatának köszönhetően, ha a Silikon spray-t hőre változó anyagokhoz (pl. latex, gumi) használjuk, a spray megvédi őket a hőhatásoktól, tehát flexibilis endoszkópokhoz is használható.
- Ne permetezze közvetlenül az endoszkópra, mert a hajtógáz károsíthatja azt.

Alkalmazási területek

Rozsdamentes acél eszközök kezeléséhez:

- orvosi műszerek (pl. gözzel történő sterilizálást megelőzően)
- lég- vagy csapágyas turbinákhoz
- zsanérokhoz, fogászati fúrókhoz és sarokpántokhoz
- Flexibilis endoszkópokhoz szintén használható.
- A Silikon spray garantálja a műszerek mozgó részeinek optimális olajozottságát.
- A nemesacél eszközök felületén képződött védőrétegnek köszönhetően garantált a hatékony korrózióvédelem.
- A hőre változó anyagokat (pl. latex) megvédi a hőhatásoktól.

Alkalmazás módjai

Műszerek:

Fújja be a félig nyitott műszert kb. 25 cm-es távolságból. Utána a jelzés szerint sterilizálja a műszert. Figyelmeztetés: Ne használjon túl sok olajat, nehogy akadályozza a sterilizáló hatást. Vékony filmrétegnek kell képződnie.

Zsanérok, turbinák vagy fogászati fúrók és sarokpántok:

Használja naponta kétszer, fújjon az eszközre kb. 1 perccel a sterilizálás vagy autoklávozás előtt. A termék használatához a flakont tartsa függőlegesen! Használat előtt felrázandó.

Összetétel

Dimethylpolysiloxan

Hajtógáz: propán-bután (CFC - mentes)

Szállítási formák

Egyedi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
500 ml aeroszol spray	12 x 500 ml	00.107.005

Speciális útmutatás

A flakonban túlnyomás uralkodik. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és 50°C feletti hőmérsékletnek! A flakont még üres állapotban is tilos kinyitni és elégetni! Fokozottan tűzveszélyes.

Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni.

Tűzforrástól távol tartandó, használata közben tilos a dohányzás.

Csak jól szellőző helyiségben használja!

Szilikon gumira nem alkalmas, ezekre a felületekre használja a Szpecial ölspray-t.

Tanúsítvány és regisztráció

Megfelel az EU 93/42 EEC, orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelvének

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország

Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft.

Tel.: 06-1-278-08-37

Fax: 06-1-278-08-38