



**Dr. Schumacher** Magyarország Kft.  
1116 Budapest Kondorosi út 3.  
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38  
Honlap cím: [www.drschumacher.hu](http://www.drschumacher.hu)  
E-mail cím: [info@drschumacher.hu](mailto:info@drschumacher.hu)

## SPEZIAL ÖLSPRAY

### Műszerápoló aeroszol

#### A készítmény típusa

Toxicológiailag ártalmatlan orvosi olaj eszközök kezelésére, a gőzben történő sterilizálást megelőzően, a mozgó alkatrészek optimális olajozására.

A speciális olajspray orvosi műszerek kezelésére használható aeroszol spray.

- Rozsdamentes acél eszközök, pl. turbinák, zsanérok, fogászati fúrók, sarokpántok kezelése:
- Az olajspray-vel történő kezelés után az orvosi műszerek alávethetők a gőzben történő sterilizálásnak.
- Zsanérok és merev endoszkóp szelepek kezelése:
- A speciális spray különösen finom védőréteget biztosít, mely azonban nem befolyásolja az eszközök későbbi sterilizálását.

A speciális olajspray az optimális olajozottságnak és a hatékony korrózióvédelemnek köszönhetően megőrzi az eszközök minőségét.

A paraffinum-liquidum használata által a speciális olajspray a legtöbb felületen használható, toxicológiailag ártalmatlan, valamint megfelel a gyógyszerekre és élelmiszerre vonatkozó törvényeknek.

#### Alkalmazási területek

Rozsdamentes acél eszközök kezeléséhez:

- orvostechikai eszközökhöz (pl. gőzben történő sterilizálást megelőzően)
- turbinákhoz
- zsanérokhoz, fogászati fúrókhoz és sarokpántokhoz
- merev endoszkópok karbantartást (kezelést) nem igénylő szelepeihez

A speciális olajspray garantálja a műszerek mozgó részeinek optimális olajozottságát.

A nemesacél eszközök felületén képződött védőrétegek köszönhetően garantált a hatékony korrózióvédelem.

#### Alkalmazás módjai

##### Műszerek:

Fújja be az olajspray-vel a félig nyitott műszert kb. 25 cm-es távolságból.

Utána a jelzés szerint sterilizálja a műszert.

Figyelmeztetés: Ne használjon túl sok olajat, nehogy akadályozza a sterilizáló hatást.

Vékony filmrétegnek kell képződnie.

#### Zsanérok, turbinák vagy fogászati fúrók és sarokpántok:

Használja a speciális olajspray-t naponta kétszer vagy fújjon az eszközre kb. 1 perccel a sterilizálás vagy autoklávozás előtt. A termék használatához a flakont tartsa függőlegesen! Használat előtt felrázandó.

#### Összetétel

Orvosi fehérölaj DAB10 szerint

Hajtógáz: propán-bután (FCKW mentes)

#### Szállítási formák

Egyedi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
500 ml aeroszol spray	12 x 500 ml	00.108.005

#### Speciális útmutatás

A flakonban túlnyomás uralkodik. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és 50°C feletti hőmérsékletnek! A flakont még üres állapotban is tilos kinyitni és elégetni! Fokozottan tűzveszélyes. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni.

Tűzforrástól távol tartandó, használata közben tilos a dohányzás.

Csak jól szellőző helyiségben használja!

*Ha latex vagy gumi felületekre használja, azok elváltozhatnak, megduzzadhatnak. Ezekre a felületekre használjon szilikon spray-t.*

Ne használja flexibilis endoszkópok olajozására!

#### Tanúsítvány és regisztráció

Megfelel az EU 93/42 EEC, orvostechikai eszközökre vonatkozó irányelvnek

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország

Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft.

Tel.: 06-1-278-08-37

Fax: 06-1-278-08-38

Készítményeink környezet-kímélők, hígítva lebomlanak. Készítményeinket a GMP-irányvonalaknak megfelelően gyártjuk. Laboratóriumunk állandóan ellenőrzi készítményeinket. A készítményekhez kapcsolódó ajánlások intenzív tudományos vizsgálatokon alapulnak, az ajánlásokat legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. Felelősségünk kizárólag az általános értékesítési és szállítási feltételekben foglaltakra vonatkoznak.