



Dr. Schumacher Magyarország Kft.  
1116 Budapest Kondorosi út 3.  
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38  
Honlap cím: [www.drsumacher.hu](http://www.drsumacher.hu)  
E-mail cím: [info@drsumacher.hu](mailto:info@drsumacher.hu)

## THERMOTON AP

gépi poralakú műszertisztító szer

### a készítmény típusa

A THERMOTON AP egy porformájú, gyengén-alkáli univerzális tisztító a gépi műszerfertőtlenítéshez. Alaposan és maradéktalanul tisztít. Különböző vízkeménységi szinteken is teljes hatékonyságot nyújt.

Speciális hab- és korróziógátlók a zavaró habképződést megakadályozzák és védelmet nyújtanak a gépalkatrészek számára. Thermostabil műszerek és anyagok tisztítása 93°C-on és fertőtlenítése egy munkafázisban. Thermolabilis anyagok anyagkímélő tisztítása 60°C-on (pl. aneszteziológiai tömlő, gumi, műanyag, elastomer).

### alkalmazási területek

A THERMOTON AP alkalmas minden fajta sebészeti műszer 93 °C-on történő tisztítására és fertőtlenítésére, valamint thermolabilis készülékek, mint aneszteziológiai tömlők, gumi, műanyag és elastomerek 60 °C-on történő tisztítására.

Hatékonyság A és B az RKI-lista (korábban BGA-lista) alapján, a BseuchG szerint.

### alkalmazás módjai

Az anyagokat az ajánlás alapján (pl. higiéniai terv) a gépbe helyezni. Számos fertőtlenítendő felületnek és üregnek kell a gépfertőtlenítéshez hozzáférhetőnek lennie.

### összetétel

Nem ionogén tensidek, oligomer foszfátok, szilikátok, habzágató, korróziógátló.

### kémiai/fizikai adatok

A 0,5%-os oldat pH-értéke: kb. 11

### felhasználási koncentrációk

A szennyezettség szerint: 0,1 – 0,5 %  
Hőmérséklet: 60 °C és 93 °C

### speciális útmutatás

A felhasználási oldat ill. a por bőrrel és szemmel ne érintkezzen. Az érintkezett testrészeket azonnal bő vízzel leöblíteni. Az UVV szerint a nem bőrhöz megállapított fertőtlenítőszerrel való eljárás során védőkesztyűt kell alkalmazni. Csak külsőleg.

### szállítási formák

| Egységnyi csomagolás | Értékesítési egység | Cikkszám   |
|----------------------|---------------------|------------|
| 5 kg vödör           | 1 x 5 kg            | 00.118.050 |

### felvétel a listára

Bejelentve a Berlini Környezetvédelmi Hivatalnál

Gyártja: Dr.Schumacher GmbH, Melsungen, Németország  
Forgalmazza: Dr. Schumacher Magyarország Kft