



Dr. Schumacher Magyarország Kft.  
1116 Budapest Kondorosi út 3.  
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38  
Honlap cím: [www.drschumacher.hu](http://www.drschumacher.hu)  
E-mail cím: [info@drschumacher.hu](mailto:info@drschumacher.hu)

## THERMOTON N

Folyékony, savas semlegesítő szer műszer mosogatógépekhez

### A készítmény típusa

A **THERMOTON N** egy folyékony, savas semlegesítőszer mosogatógépekhez. A **THERMOTON N**-t az első öblítővízhez, az alkáli tisztítás után kell adagolni.

### Alkalmazási területek

A **THERMOTON N** a gépi mosogatás fő mosogatófázisban lerakódott alkáli-maradványok semlegesítésére valamint az esetleges vízkőlerakódások eltávolítására szolgál.

A **THERMOTON N** jól oldja a fehérjeanyagokat, szerves bázisokat, carbonátokat és hidroxidokat, megkönnyítve ezáltal a kapcsolódó alkáli tisztítást.

Tipikus felhasználási területek az OP-terület műszereinek a felkészítése, az aneszteziológiában és az intenzív-osztályon. A **THERMOTON N** a mikrobiológiában és a laborokban is felhasználható.

### Összetétel

foszforsav  
komplexbildner  
korróziógátló

### Kémiai/fizikai adatok

A koncentráció: színtelen folyadék  
A koncentráció pH-értéke: 0,8 +/- 0,4  
Sűrűség (20,0 °C): 1,14 g/ccm +/- 0,010

### Adagolás

Általában elegendő egy 1 ml/liter koncentrációval öblítő oldat. Erős szennyezettség esetén az adagolás 3 ml / literes öblítő oldatra emelhető. A hozzáadás általában automatikusan az adagolópumpával történik.

### Szállítási formák

Egyedi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
5 literes PE kanna	1 x 5 liter	00.140.050

### Adagolási segédeszközök

Kannatöltő csap, adagolópumpa a kannaéhoz.

### Felvétel a listára

Bejelentve a Berliini Környezetvédelmi Hivatalnál.

Gyártja: Dr.Schumacher GmbH, Melsungen, Németország  
Forgalmazza: Dr. Schumacher Magyarország Kft