

# Descoprent

**Használatra kész tisztító - fertőtlenítő készítmény protézisanyagokhoz és fogtechnikai munkadarabokhoz**

- **Nem károsítja a forma méretét**
- **Felületkímélő**
- **Jó nedvesítő tulajdonságú, könnyen leöblíthető**

CE 0482

## Készítmény típusa

Aldehid és kvaterner ammóniumvegyület (QAV) bázisú készítmény, mely kitűnően alkalmazható protézis anyagok és fogtechnikai munkadarabok merülő fürdős fertőtlenítő tisztítására, anélkül, hogy károsítaná a felületek minőségét és alakját. Szagtalan, fenol- és formaldehid-mentes készítmény

## Alkalmazási területek

Használatra kész készítmény fogtechnikai munkadarabok és protézisanyagok fertőtlenítő tisztítására, mint például poliéter, A/C szilikon, alginát, hidrokolloid lenyomatok tisztítására.

## Felhasználás

Alginát és hidrokolloid alapú munkadarabokat csak rövid ideig merítsük az oldatba, és 5 percig hagyjuk száradni. Egyéb anyagokat 5 percig helyezzük az oldatba, és utána vízzel öblítsük le őket.

## Antimikrobiális hatásspektrum

- Baktericid (MRSA)
- Tuberkolocid
- Yeasticid
- Virucid (HBV/HIV/BVDV/HCV, Vaccinia-/Influenza- és Rota-vírusok)

## Alkalmazási koncentrációk és behatási idő

**A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni!**

**Baktericid (MRSA), Yeasticid** DGHM/VAH ajánlás szerint  
Magas szennyezettségnél hígítatlanul 5 min.

**Burkos vírus ellen** (HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia-/Influenza-vírus) hígítatlanul 1 min.  
Rota-vírus hígítatlanul 5 min.

## Összetétel

100 g oldat tartalmaz:  
0,01g pentandial  
0,20 g ethandial  
0,48 g dimethylbenzylalkyl-ammonium-chloride

## Kémiai-fizikai tulajdonságok

**Kinézet:** halványkék, tiszta folyadék  
**pH-érték:** 5,5 ± 1,0  
**Sűrűség (20 °C):** kb. 1,000 ± 0,003 g/ml

**Fenolmentes  
Formaldehid-mentes**



## Szállítási formák

**Kiszerezés** 5 liter PE kanna  
**Gyűjtőcsomagolás** 3 x 5 liter

## Adagolóeszközök

Kannakulcs, kannacsap

## Speciális útmutató

Kerülje a készítmény szembe és bőrre jutását. Szembe kerülés esetén, bő vízzel azonnal öblítse ki. Forduljon szakorvoshoz. Gyermekektől távol tartandó.

## Szakvélemények

**Prof. Dr. Schubert**, Higiénikus, Frankfurt/Main:  
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH irányelvek szerint.

**Dr. Suchomel**, Higiénikus, Vienna:  
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH irányelvek szerint.

**Prof. Werner**, Higiénikus, Schwerin:  
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH irányelvek szerint.

**Dr. Steinmann**, virológus, Bremen:  
Szakvélemény a Vaccinia- vírus elleni hatásról a DVV/RKI irányelvek alapján.  
Szakvélemény a Rota-vírus elleni hatásról a DVV/RKI irányelvek alapján.

Szakvélemény a BVDV/Hepatitis C -vírus elleni hatásról a DVV/RKI irányelvek alapján.

**Weber & Partner**, fogtechnika, Hamburg:  
Anyag kompatibilitás vizsgálata lenyomatokon.

## Környezetvédelmi információk

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárásokkal készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét.

## Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára.  
Felvéve az aktuális virucid listájára.  
Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvben foglaltaknak.

### Gyártja

Dr. Schumacher GmbH, Németország

### Forgalmazza

Dr. Schumacher – Sz&T Magyarország Kft.

### Engedélyek

OTH engedély: nem engedélyköteles

### Orvostechnikai eszköz