

Descoprent

Munka kész tisztító-fertőtlenítő oldat lenyomatokhoz és fogtechnikai munkadarabokhoz

- **Nem károsítja a forma méretét**
- **Nem marja meg a felületet**
- **Jó nedvesítő képességgel rendelkezik, könnyen leöblíthető**
- **Formaldehid- és fenol mentes**



Készítmény típusa

Aldehyd- és QAV bázisú munka kész készítmény, mely lenyomatok merülő fürdős fertőtlenítésre és tisztítására használható. A **Descoprent** bizonyítottan anélkül tisztít és fertőtleníti, hogy a tárgyak alakhűségét vagy a felületminőségét károsan befolyásolná. A készítmény színtelen és szagtalan, emellett sem formaldehidet, sem fenolt nem tartalmaz.

Alkalmazási területek

Fogtechnikai munkadarabok és protézisanyagok, mint poliéter A/C szilikon, alginát és hidrokolloid lenyomatok kézi gyors fertőtlenítésére és alapos tisztítására használható munka kész oldat.

Felhasználás

Alginát és hidrokolloid alapú munkadarabokat csak rövid ideig merítsük az oldatba, és 10 percig hagyjuk száradni. Egyéb anyagokat 10 percig helyezzük az oldatba, és utána vízzel öblítsük le őket.

Hatásspektrum

A **Descoprent** hatásspektrumai:

- Baktericid (MRSA is);
 - Tuberkoloid;
 - levurocid;
 - Virucid (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-/ Influenza -/Nátha- és Rota-vírusok)
- RKI szerint korlátozottan virucid.

Behatási idők

Munka kész oldat. Tilos hígítani!

baktericid (MRSA), levurocid	DGHM/VAH-irányvonal szerint
Növelt terhelés mellett	konc. 5 min
Virucid minden burkos vírusra (HBV/HIV/Vaccinia/HCV/BVDV/Influenza-/Nátha-vírusok)	konc. 10 min
Vaccinia-vírus	konc. 1 min.
Rota-vírus	konc. 5 min.
HBV/HIV	konc. 1 min.

Összetétel

100 g oldat tartalmaz:
0,01g pentandial
0,20 g ethandial
0,48 g dimethylbenzylalkyl-ammoniumklorid

Kémiai–fizikai tulajdonságok

Kinézet:	tiszta, világoskék folyadék
pH-érték:	5,5 ± 1,0
Sűrűség (20 °C):	kb. 1,000 ± 0,003 g / ml

Szállítási formák

Kíszerelés	Gyűjtőcsom.	Cikkszám
5 liter PE kanna	1 x 5 liter	00.813.050

Adagolóeszközök

Kannakulcs, kannacsap

Speciális útmutató

Használat során védőkesztyűt, kell használni. Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni kell. A termék maradékát és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Baleset vagy rosszullet esetén orvost kell hívni, a címkét mutassuk meg. Gyermeknek elöl elzárva tartandó.

Descoprent

Munka kész tisztító-fertőtlenítő oldat lenyomatokhoz és fogtechnikai munkadarabokhoz

Szakvélemények

Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/M
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH
irányelvek szerint (2006.06.16.)

Dr. Suchomel, Hygienikerin, Wien
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH
irányelvek szerint (2008.11.17.)

Dr. Steinmann, virológus, Bremen
Szakvélemény a Vaccinia-vírus elleni hatásról
(2010.01.07.)

Szakvélemény a BDVD elleni hatásról (2003.08.19.)

Szakvélemény a Rota-vírus elleni hatásról
(2000.03.24.)

Szakvélemény a HBV elleni hatásról (2000.04.10.)

Weber & Partner, fogtechnika, Hamburg
Anyagbarát tulajdonságok vizsgálata lenyomatokon.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára.

Felvéve az IHO aktuális virucid listájára. (www.iho-viruzidie-liste.de)

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

OTH engedély: nem engedélyköteles

OKK-OKBI bejelentés: OKBI-VABO/735/2006