

# Plurazyme<sup>®</sup> extra

## Enzimatis endoszkóp- és sebészeti műszer-tisztítószer

- **Kimagasló tisztítóerő**
- **Hármas enzim formátumú koncentrátum**
- **Ultrahangos kádákban is használható**
- **Anyagkímélő tulajdonságú**



DR. SCHUMACHER

### Készítmény típusa

A **Plurazyme<sup>®</sup> extra** kiváló a anyagbarát tulajdonságokkal rendelkezik és ennek köszönhetően és ideális kézi előkészítés esetén sebészeti eszközökhöz és flexibilis endoszkópokhoz. A készítmény gazdaságosan és megfelelően használható ultrahangos kádákban is.

A **Plurazyme<sup>®</sup> extra** kiemelkedő tisztítóerőt biztosít a nemionos felületaktív tisztítószerrel kombinálva és a hármas enzim formátumnak köszönhetően. Az önműködő formula szembeszáll, behatol és hatékony eltávolít minden szerves szennyeződést, úgy mint a fehérjék, alvadt vér, nyálka, hányadék, zsír és fekália, akár a nehezen hozzáférhető helyekről is.

### Alkalmazási területek

A **Plurazyme<sup>®</sup> extra** különösen alkalmas kézi előkészítésre fehéérje megkötés nélkül az alábbi esetekben:

- minden típusú orvosi eszköz;
- Merev és flexibilis endoszkópok;
- Endoszkóp tartozékok;
- Ideális ultrahangos kádákhoz;

### Felhasználás

Készítsen 0,4%-os **Plurazyme<sup>®</sup> extra** munkaoldatot 4 ml koncentrátum per 1 liter meleg víz felhasználásával. Meleg víz (30-40 °C) használat szükséges. Helyezze a eszközöket és az endoszkópokat a munkaoldatba úgy, hogy az teljesen ellepje őket, valamint minden járatot át tudjon járni. A lencséből teljesen távolítsa el a levegőt. Az endoszkópok csatornáit mechanikusan tisztítsa meg.

### Behatási idők

Koncentráció	Hőmérséklet.	Hatóidő
0,25% (2,5 ml/L)	30-40 °C	min. 5 perc
Javasolt ultrahangos kádánál		
0,4% (4 ml/L)	30-40 °C	min. 5 perc

### Kémiai-fizikai adatok

**Kinézet:** tiszta, kék folyadék  
**pH-érték, konc.:** 8,0  
**pH-érték, 0,4% oldat:** 7,0–7,5

### Összetétel

5-15 % nem ionos tenzid, konzerváló anyag, 2-methyl-2H-isothiasol-3-one, 1,2-benzylisothiasol-3(2h)-one, enzimek: Protease, Amylase, lipáz

### Szállítási formák

Kiszerezés	Gyűjtőcsom.	Cikkszám
1 L PE adagolóflakon	12 x 1 L	00-138-010EXP
5 L PE kanna	1 x 5 L	00-138-050EXP

### Adagolóeszközök

Adagolóflakon  
Adagolópumpa 2 L-es és 5 L-es kannához (00.906.000)  
Kannacsap, kannakulcs, adagolóautomata

### Speciális útmutató

Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni kell. Súlyos szemkárosodást okozhat. Kerüljük a készítmény szemmel vagy bőrrel való érintkezését. Használat során védőruházatot, védőszemüveget/álarcot kell használni. Baleset vagy roszszullét esetén orvost kell hívni, a címkét mutassuk meg. A termék Alpha amylase, Subtilisin, lipáz anyagokat tartalmaz, melyek allergiás reakciókat válthatnak ki.

### Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

# Plurazyme<sup>®</sup> extra

## Enzimatis endoszkóp- és sebészeti műszer-tisztítószer

### Anyag megfelelőségi információ

**Plurazyme<sup>®</sup> extra** kiváló anyag kompatibilitást biztosít, valamint használatát a következő anyagokon vizsgálták. Használata javasolt:

*Fémek:*

- Rozsdamentes acél (V2A, V4A);
- Réz;
- Alumínium;

*Műanyagok:*

- Polimetil-akrilát (PMMA);
- Polioximetilén (POM);
- Akrlitril-butadién-sztirol (ABS);
- Polikarbonát (PC);
- Polietilén (PE);
- Poliamid (PA6, PA12);
- Polisztirol (PS);
- Poliészter (PES);

*Elasztomerek:*

- Nitril-butadién-gumi (NBR);
- Neoprén, polikloroprén;
- Szilikon;
- Latex;

**Használata nem javasolt:**

- sárgaréz;
- Etilén-propilén-dién-monomer gumi (EPDM)

### Forgalomba hozatali információk

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

**Kizárólagosan foglalkozásszerű felhasználásra!**

**Gyártja**

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

**Forgalmazza**

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

**Engedélyek**

OKK-OKBI bejelentés: B-14050298