

Descosuc Cleaner

Aldehyd- és fenol mentes

Tisztítószer fogászati elszívó rendszerekhez

- **Kiváló tisztítóhatás**
- **Habzáscsökkentett**
- **Kiegészítő intenzív tisztítószer a Descosuc fertőtlenítőszer használatához**



Készítmény típusa

Folyékony koncentrátum mindenfajta fogászati elszívó berendezés rendszeres és intenzív tisztításához. Egyaránt alkalmazható az amalgámszeparátorral rendelkező és amalgámszeparátorral nem rendelkező elszívó berendezések, szájöblítő kagylók és csővezetékek rendszeres tisztítására.

A **Descosuc Cleaner** használata biztosítja az elszívó berendezések optimális tisztítását, valamint súrlódás- és zavarmentes működését.

Alkalmazási területek

A **Descosuc Cleanert** hetente egy - két alkalommal használjuk. Szennyezettség függvényében 50-től 100 ml-ig egészítsük ki a **Descosuc Cleanert** 1 literig vízzel. Tisztításhoz készítsünk frissen 2 liter munkaoldatot. (A tisztítást pl. ebédszünetben végezzük el.) A használatra kész oldat 2/3-át szívjuk fel a szívócsövön keresztül, az 1/3-át borítsuk a szájöblítő kagylóba be.

A legjobb tisztító hatást kb. 1,5-2 órás behatási idő mellett érhetjük el. A behatási idő letelte után a rendszert tiszta vízzel öblítsük át, hogy a csővekből eltávolítsuk el a feloldott szennyeződéseket.

Az oldatot semmi esetre se hagyjuk éjszakára a berendezésben.

Adagolás/Behatási idő

Normál szennyezettség esetén	5 %
Erős szennyezettség esetén	10 %-ig
Behatási idő:	1,5-2 óra a szennyezettség függvényében

Kémiai/fizikai jellemzők

Kinézet:	tiszta, sárgás folyadék
pH-érték:	Kb. 1,7 ± 0,5
Fajsúly (20 °C):	Kb. 1,058 g/ml

Összetétel

Szerves savak, komplexképzők, korróziógátló adalék, oldószer

Szállítási formák

Kiszerezés	Csomagolási egység
1 liter, adagolóflakon	10 x 1 liter
5 liter, kanna	3 x 5 liter

Adagolóeszközök

Kannakulcs, kannacsap, adagolóflakon, adagolópumpa

Speciális útmutató

Erősen maró hatású készítmény. Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni kell. A termék maradékát és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Használat során védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget/álarcot kell használni. Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne nyeljük le.

Baleset vagy rosszulletés esetén azonnal hívjunk orvost (lehetőség szerint a címkét mutassuk meg).

Forgalomba hozatali információk

Megfelel az EU 93/42/EEC orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelvében foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft.

Engedélyek

OTH engedély: nem engedélyköteles

Orvostechnikai eszköz